

## Clungene Corona Speichel-Schnelltest

Test der neusten Generation – kein Rachenabstrich mehr notwendig

Einfache Proben  
Entnahme

Schnelles Testergebnis

CE Zertifizierung

- Speicheltest, **ohne Nasen oder Rachenabstrich**
- Einfach Probenentnahme mit beiliegendem Trichter
- CE Zertifizierung
- Schnelle Ergebnisse in 15 Minuten
- Alle benötigten Utensilien enthalten
- Sehr gut für große Testmengen
- **Sensitivität: 96,8%**
- **Spezifität: 99,6%**

### Produkt Fotos:



## Verpackung:

20 Stück Testkits / Packung

- 20 Testkassetten, jede in einem einzeln verpackten Beutel
- 20 Ampullen mit je 0,3ml Testflüssigkeit
- 20 Speichelsammeltrichtern
- 20 Sammelröhrchen
- 20 Pipetten
- 1 Röhrenhalter
- 1 Gebrauchsanweisung



## Zertifikate:



杭州隆基生物技术有限公司  
Hangzhou Clongene Biotech Co., Ltd.

Tel: +86-571-88262120  
Fax: +86-571-88261752

Web: www.clongene.com  
Email: marketing@clongene.com

### EC DECLARATION OF CONFORMITY

Name and address of the manufacturer: **Hangzhou Clongene Biotech Co., Ltd.**  
**No.1 Yichuang Road, Yuhang Sub-district**  
**Yuhang District**  
**311121 Hangzhou**  
**China**

We declare under our sole responsibility that

the medical device: **COVID-19 Antigen Rapid Test Cassette (Saliva)**

of class: **Other**  
according to article 9 of directive 98/79/EC

meets the provisions of the directive 98/79/EC and its transpositions in national laws which apply to it. The declaration is valid in connection with the "final inspection report" of the device.

Conformity assessment procedure: **Directive 98/79/EC Annex III, excluding Section 6**

Applicable standards: **EN ISO 13485:2016**      **EN ISO 15223-1:2016**  
**EN ISO 23640:2015**      **EN13612:2002/AC:2002**  
**EN 13975:2003**      **EN ISO 14971:2012**  
**EN ISO 18113-1:2011**      **EN ISO 18113-2:2011**  
**EN 62366-1:2015**

Name and address of the authorized representative: **Shanghai International Holding Corporation GmbH (Europe)**  
**Eiffestrasse 80**  
**20537 Hamburg**  
**Germany**

Hangzhou, February 03, 2021

Place, date




Shujian Zheng, Legal representative

Name and function

## Kurzanleitung:

1

Nutzen Sie den beiliegenden Trichter und das Probenröhrchen, um Speichel zu entnehmen

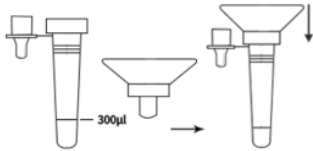


2

Setzen Sie den Trichter an die Lippen und lassen den Speichel bis zur markierten Stelle in das Röhrchen fließen.




3

Stellen Sie das Teströhrchen MIT dem Trichter in den Röhrchenhalter.

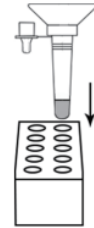


4

Öffnen Sie das Fläschchen mit der Testflüssigkeit und geben es über den Trichter in das Röhrchen.

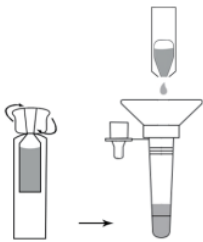


5

Entfernen Sie nun den Trichter und verschließen das Röhrchen mit dem Pipettendeckel.

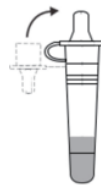

6

Schütteln Sie das Röhrchen mindestens 3 mal, damit sich die Testflüssigkeit gut vermischt.

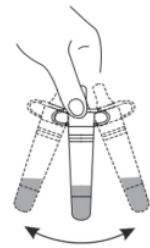


7

Drücken Sie das Röhrchen 10 mal leicht zusammen, damit alles gut vermischt ist.



8

Halten Sie das Röhrchen aufrecht und geben langsam 3 Tropfen in das Testfeld (S) der Testkassette.

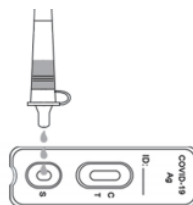


9

Lesen Sie das Ergebnis nach 15 Minuten ab. Nach 20 Minuten ist das Testergebnis nicht mehr ablesbar!




## Ablezen der Testergebnisse:

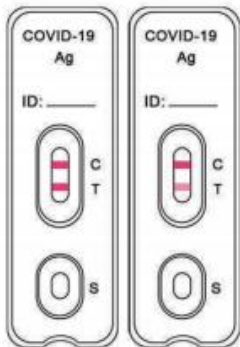

Positive



Negative

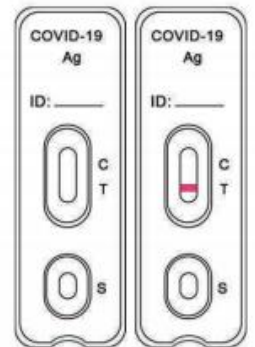

Invalid

Sie erreichen uns unter Tel: 05691- 5009490

[www.hps-shop24.de](http://www.hps-shop24.de)

## Bestellschein:

Bitte ankreuzen	<input type="checkbox"/> Ich bin bereits Kunde (Kundennummer falls bekannt, bitte angeben)	..... <input type="checkbox"/> Neukunde		
Rechnungsempfänger	Lieferadresse (falls abweichend von der Rechnungsadresse)			
Firma / Name	Firma / Name			
Straße / Nr.	Straße / Nr.			
PLZ / Ort	PLZ / Ort			
Tel / Fax / E-Mail	Tel / Fax / E-Mail			
Ust-ID (Bei Bestellungen aus dem Ausland bitte angeben)	Bemerkungen			
<b>Die Bestellung erfolgt verbindlich:</b>				
Artikelnummer	Artikelbezeichnung	Menge	Preis €	Gesamt €
Versandkostenfrei ab einem Bestellwert in Höhe von 750,00EUR				6,95 €
Alle Preise verstehen sich zzgl. gesetzlicher M			Gesamtsumme netto:	

\* Der Versand erfolgt innerhalb von 5 - 7 Werktagen nach Zahlungseingang oder Absprache.  
 Bei Bestellmengen ab 100 Stück sind produktabhängige Mengenrabatte möglich.  
 Aufgrund der aktuellen Situation kann es zu kurzfristigen Lieferverzögerungen kommen. Wir informieren Sie ggf. Es gelten die  
 allgemeinen Geschäftsbedingungen.

Durch die Unterschrift bestätigen wir die rechtsverbindliche Bestellung:

\_\_\_\_\_  
 Ort, Datum

\_\_\_\_\_  
 Unterschrift

\_\_\_\_\_  
 (Name in Druckbuchstaben)

BITTE SENDEN SIE IHRE BESTELLUNG AN: **Mail:** [bestellungen@hpsolutions.de](mailto:bestellungen@hpsolutions.de)  
**Fax: 05691 5009200**